

° C P A T C H

オンドパッチ

Check Color, Check Fever



見せる体温モニタリングシール


・C P A T C H

オンドパッチ

実 用 新 案 登 録 済

#### オンドパッチとは

「オンドパッチ」は、おでこや耳もと、首筋など体幹に貼るだけで手軽に体温チェックができるシールです。日々の体温・体調管理はもちろん、ご家庭・職場での相互チェックや、来場者で混雑する施設・イベントでのスピーディーなチェックにご活用いただけます。

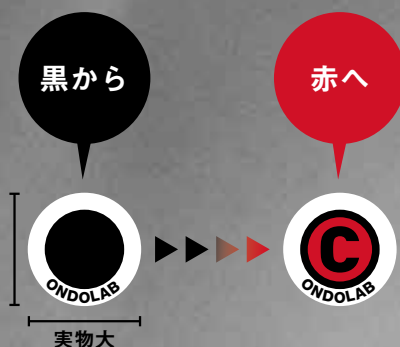

# 商品特徴

## “貼るだけ”で体温検知

直径わずか14mm!  
小さなシールで体温ケア  
肌に優しいラテックスフリーの  
医療用粘着剤を使用

## “発熱”が見える

発熱して体温が上がると  
シールが黒から赤に変化  
体温が下がると  
すみやかに黒に戻ります

## 素早くチェック

たったの15秒で色変化  
大規模施設やイベントなど  
大人数のチェック作業が  
素早く・効率的に行えます

## “40年以上”の実績

欧米の医療機関で  
40年以上使用された  
体温計測シールと同じ  
独自の液晶技術です

## “高精度”の±0.5℃


感熱特殊インクと比べ  
ヒステリシスが狭いため  
加熱・冷却に関係なく  
正しく機能します

## “世界シェア1位”の英国製


温度測定ラベルとして  
世界シェアナンバー1  
50年以上の歴史がある  
イギリス製です

オンド  
パッチ

温度応答が正確&スピーディー

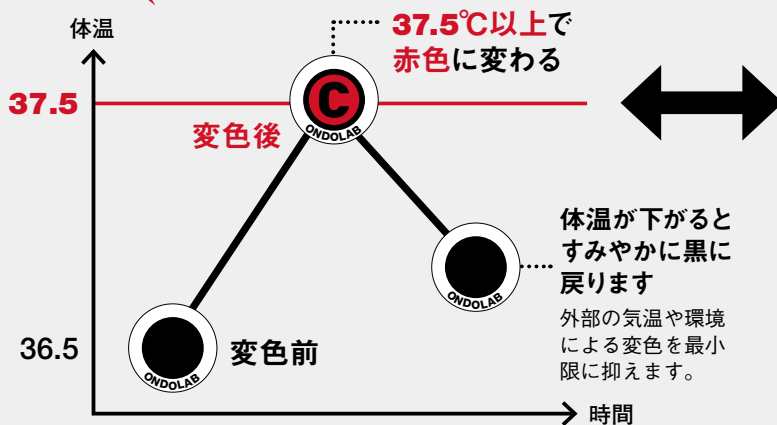

感熱インク(ロイコ染料)を使用した商品では、  
設定温度より3~5℃程戻りが遅くなります(ヒステリシス現象)

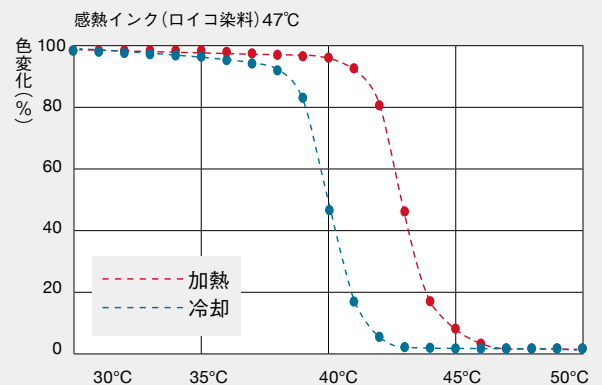

### ● 弊社独自技術の液晶ラベル(オンドパッチ)

指示温度以上で赤色をキープ



指示温度で「黒→赤」に速やかで明瞭な色変化。

### ● 従来の液晶ラベル

様々な色に変化するため色判定が難しい



・従来の液晶ラベルは、黒→赤→緑→濃紺に変化。

新しい接客オペレーションに！

お客様の安心感に！

お店のイメージUPに！

## 日々、不特定多数の方が出入りする あらゆるシーンでのご利用をオススメします！



イベント



コンサート



試験会場



劇場



テーマパーク



学校



保育所



図書館



病院



介護施設



工場



オフィス



ホテル・レストラン



ジム



鉄道・飛行機

### 使用方法

おでこ、耳下、首筋など体温を測定しやすい体幹部に貼付してご使用ください。  
あらかじめ貼付する部分の皮脂や水分、化粧を拭き取ってください。  
およそ15秒で体温に応じて、黒／赤色に変化します。

### 商品仕様

【用途】	体温モニタリング	【設定温度】	37.5℃以上で赤色 37.5℃以下で黒色 (コア体温に近づけるため1.5℃オフセットし、表面温度36℃に設定しています)
【本体寸法】	直径:約1.4cm	【精度】	±0.5℃ 設定温度でシャープに変色します
【材質】	液晶 ポリエステルフィルム 医療用粘着剤	【製造国】	イギリス

### 注意事項

体調が悪い時や発熱を感知した場合は医療用体温計で測定してください。

### カスタム対応

- 特注で大きさやロゴ、温度設定(-20℃~80℃)など、自由にカスタマイズできます。
- 一枚あたり30円~(サイズや形状、数量によって異なります)。
- 試作用として小ロットも対応可能です(セットアップチャージ20万円~)。

### 【総発売元】

## アイピー技研株式会社

〒170-0003 東京都豊島区駒込2-3-1(六興ビル)

<https://ondolab.com/>

TEL:03-3917-3121(代表)  
E-mai:info@ondolab.com

ONDOLAB.

Copyright © 2019 ONDOLAB. All Rights Reserved.